

# ノーベルプロセラ ASC\* ジルコニア・アバットメント (歯科技工物)



## \*Angulated Screw Channel (角度付きスクリュー・チャンネル) アバットメント & オムニグリップ・ドライバー発売のご案内

ノーベルプロセラ ASC ジルコニア・アバットメントは、ノーベルバイオケア・インターナル・コニカル・コネクション・インプラント用の新しいタイプのアバットメントです。アバットメントのアクセスホールをインプラント長軸から最大25度まで傾斜(移動)させることが可能なため、前歯部領域ではアクセスホールを舌側に傾斜(移動)させることにより、審美的なスクリュー固定を可能にします。また、咬合高径が制限された臼歯部の症例においてもアクセスホールを近心に傾斜させることにより、ドライバーのアクセスを容易にすることができます。なお、ASCアバットメント専用開発されたオムニグリップ・ドライバーおよびオムニグリップ・スクリューは保持性に優れ、口腔内でも安心して操作頂けます。アバットメントは、ノーベルプロセラCAD/CAMシステムを使用し、症例に応じて個別にデザイン、オーダー頂けます。アバットメントの価格はプロセラ ネットワーク ラボへお問い合わせください。

### 手用ドライバー・オムニグリップ

	製品番号
 <b>手用</b>	
手用ドライバー・オムニグリップ 20mm	37376
手用ドライバー・オムニグリップ 28mm	37377
手用ドライバー・オムニグリップ 36mm	37378


(届出番号:13B1X00052000053)



ASCジルコニア  
アバットメント

アクセスホールは0°~25°まで傾斜角が自由に選べます。また、本製品は金属製アダプターの有/無しをソフトウェア上で選択頂けます。(アダプター無しは0°のみになります。)

### マシン用ドライバー・オムニグリップ

	製品番号
 <b>マシン用</b>	
マシン用ドライバー・オムニグリップ 20mm	37379
マシン用ドライバー・オムニグリップ 25mm	37380
マシン用ドライバー・オムニグリップ 30mm	37381
マシン用ドライバー・オムニグリップ 35mm	37382

(届出番号:13B1X00052000053)



オムニグリップ  
アバットメントスクリュー



NP用 RP用

オムニグリップ・アバットメントスクリューはASCアバットメントと同梱されます。ブルーのカラーリングが付与され、ユニグリップとの識別が可能です。オムニグリップとユニグリップは互換性ありませんので、ご注意ください。

### 技工用スクリュー


	製品番号
 <b>オムニグリップ・技工用スクリュー CC NP</b>	37374
 <b>オムニグリップ・技工用スクリュー CC RP</b>	37375

備考: オムニグリップ技工用スクリューは、スクリュー全体がブルーになっています。  
(届出番号:13B1X00052000039)

### ASCアバットメント臼歯部症例



オムニグリップドライバーがしっかりとアバットメントスクリューを保持するため、口腔内でも安心して操作できます。  
症例提供: Mr. Patrick and Luc Rutten, Dental Technician, Belgium

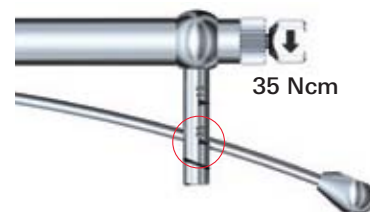

オムニグリップ・アバットメントスクリュー NP/RPの締め付けトルクは35Ncmです。

お問い合わせ先: ノーベル・バイオケア・ジャパン株式会社 カスタマーサービス  
〒108-0075 東京都港区港南2-16-4 品川グランドセントラルタワー8F TEL: 03-6717-6191 (代表)