



## キットボックスの耐熱温度について (使用上の注意)

以下のキットボックスの耐熱温度は **150°C** となっております。乾燥工程において、150°Cを超える高温になる滅菌器をご利用の場合には、乾燥工程を省いてください。

尚、滅菌器の詳細につきましては、各メーカーへお問い合わせください。

32300	ノーベルリプレイス・テーパード・サージェリー・キット	32792	ノーベルダイレクト 3.0 外科用キット
32301	ノーベルリプレイス ストレート外科用キット	32793	ノーベルダイレクト 3.0 外科用キットボックス
32302	プロネマルクシステム外科用キット	32797	ガイテッド・ドリルガイドキットボックス
32304	ノーベルバイオケア フラップレス外科キット	32952	ノーベルダイレクト外科用キット
32305	IP インプラントスターターキット	32953	ノーベルダイレクト外科用キットボックス
32306	プロネマルクシステム ガイテッド外科キット	32954	リプレイステーパード・ガイテッド外科キット
32308	プロネマルクシステム 2 次外科用キット	32955	リプレイステーパード・ガイテッド外科用キットボックス
32312	プロネマルクシステム外科用キットボックス	32957	ガイテッド・ドリルガイド テーパードキットボックス
32313	ノーベルリプレイス ストレート外科用キットボックス	33234	ノーベルダイレクト・ガイテッド外科用キット
32314	ノーベルリプレイス・テーパード外科用キットボックス	33236	ノーベルダイレクト・ガイテッド外科用キットボックス
32315	プロネマルク 2 次外科用キットボックス	33316	プロセラ エステティック アパットメント リプレイス セレクション キット
32317	ノーベルバイオケア フラップレス外科キット ボックス	33435	プロセラ エステティック アパットメント プロネマルク セレクション キット
32319	IP インプラントキットボックス	33483	プロセラ エステティック アパットメント プロネマルク セレクション キットボックス
32320	プロネマルクシステム ガイテッド外科用キットボックス	33484	プロセラ エステティック アパットメント リプレイス セレクション キットボックス
32322	補綴用キットボックス		

ご不明な点等がございましたら弊社営業担当者または、カスタマーサービス **03-6717-6191** までお問合せください。

ノーベル・バイオケア・ジャパン株式会社

**ドリルストップ キット(#32430)  
ガイドッド ドリルストップ キット(#33085)  
使用上の注意**

- ★ ドリルストップは、ツイストドリル及び、ツイストステップドリルに使用可能ですが、 $\phi$  2.8mm 以上のツイストドリル、ツイストステップドリルの最大目盛には装着できません。

例) 18mm の長さのツイストドリルの場合、18mm の目盛には装着できません。



ご不明な点等ございましたら、弊社営業担当者または、カスタマサービス **03-6717-6191** までお問合せください。

ノーベル・バイオケア・ジャパン株式会社