

ノーベルガイド・ノーベルリプレイス・テーパード 11.5mm 対応のドリル & キットプレート

ノーベルガイドの新ソフトウェア「ノーベルクリニシャン」の発売に伴い、ノーベルリプレイス/リプレイスセレクト・テーパード・インプラント11.5mmの治療計画が可能となりました。

それに伴い、11.5mmのラインが加わったガイドッド・ツイストドリル、テーパードドリル11.5mmを発売いたします。既にノーベルリプレイス・テーパード・ガイドッド外科用キットをお持ちの場合、アップグレード・パッケージをご利用いただくことで、既存のキットボックスの更新ができ、新しい11.5mm用ドリルの収納が可能となります。

No. 73824 ノーベルリプレイス・テーパード 11.5mm ガイディッド・アップグレード・パッケージ

既にノーベルリプレイス・テーパード・ガイドッド外科用キットをお持ちの場合、アップグレード・パッケージをご注文いただければ、点線枠内に記載の下記製品がすべて含まれております。



No. 36921
ノーベルリプレイス・ガイディッド
アクセス キットプレート



No. 36922
ノーベルリプレイス・テーパード
ガイディッドドリリング キットプレート



No. 36926
ノーベルリプレイス・ガイディッド
インプラントインサートキットボックス



New!
11.5mmのライン入り

No. 36123
ガイディッドツイストドリルテーパード
2x(10+) 8-16mm
No. 36119
ガイディッドテーパードドリル NP 11.5mm
No. 36120
ガイディッドテーパードドリル RP 11.5mm
No. 36121
ガイディッドテーパードドリル WP 11.5mm

既存のガイディッド・ツイストドリル・テーパード 2x (10+) 8-16mm (No. 32744) は、11.5mmのライン入りドリル(No. 36123) の発売に伴い、在庫が無くなり次第、販売終了となりますのでご了承ください。

新製品一覧

| 製品番号 | 製品名 |
|--------|---------------------------------------|
| 36123* | ガイディッド・ツイストドリル・テーパード 2x (10+) 8-16mm |
| 36119* | ガイディッド・ドリル・テーパードNP 3.5x (+) 11.5mm |
| 36120* | ガイディッド・ドリル・テーパードRP 4.3x (+) 11.5mm |
| 36121* | ガイディッド・ドリル・テーパードWP 5x (+) 11.5mm |
| 36122 | ガイディッド・ドリル・テーパード6.0 6x (+) 11.5mm |
| 36921* | ノーベルリプレイス・ガイディッド・アクセスキット・プレート |
| 36922* | ノーベルリプレイス・テーパード・ガイディッド・ドリリングキット・プレート |
| 36926* | ノーベルリプレイス・ガイディッド・インプラント・インサートキット・ボックス |
| 36924 | ノーベルリプレイス・ガイディッド・アクセスキット・ボックス |
| 36925 | ノーベルリプレイス・テーパード・ガイディッド・ドリリングキット・ボックス |

医療機器届出番号: 13B1X00052000020

※キットボックスには、ドリルなどの製品は含まれません。

※アップグレード・パッケージには、*印がついた製品が含まれます。製品は単品でのご購入も可能です。

現在、キットボックスをお持ちでないお客様、またはキットボックスをもう1つお持ちになりたいお客様は、新しいプレートがセットされたキットボックスを別途ご購入いただくことも可能です。



No. 36924
ノーベルリプレイス・ガイディッド
アクセス キットボックス




No. 36925
ノーベルリプレイス・テーパード
ガイディッドドリリング キットボックス

プレート交換手順

① 新プレート(No. 36921 & 36922) および新発売のインプラントインサートキットボックス(No. 36926)をご用意ください。


② 既存のキットボックス(No. 32955 & 32957)からプレートを外します。

③ プレート交換後、取り外したプレートは廃棄してください。アップグレード後は、インサートキットボックスが加わり、合計で3つのキットボックスになります。

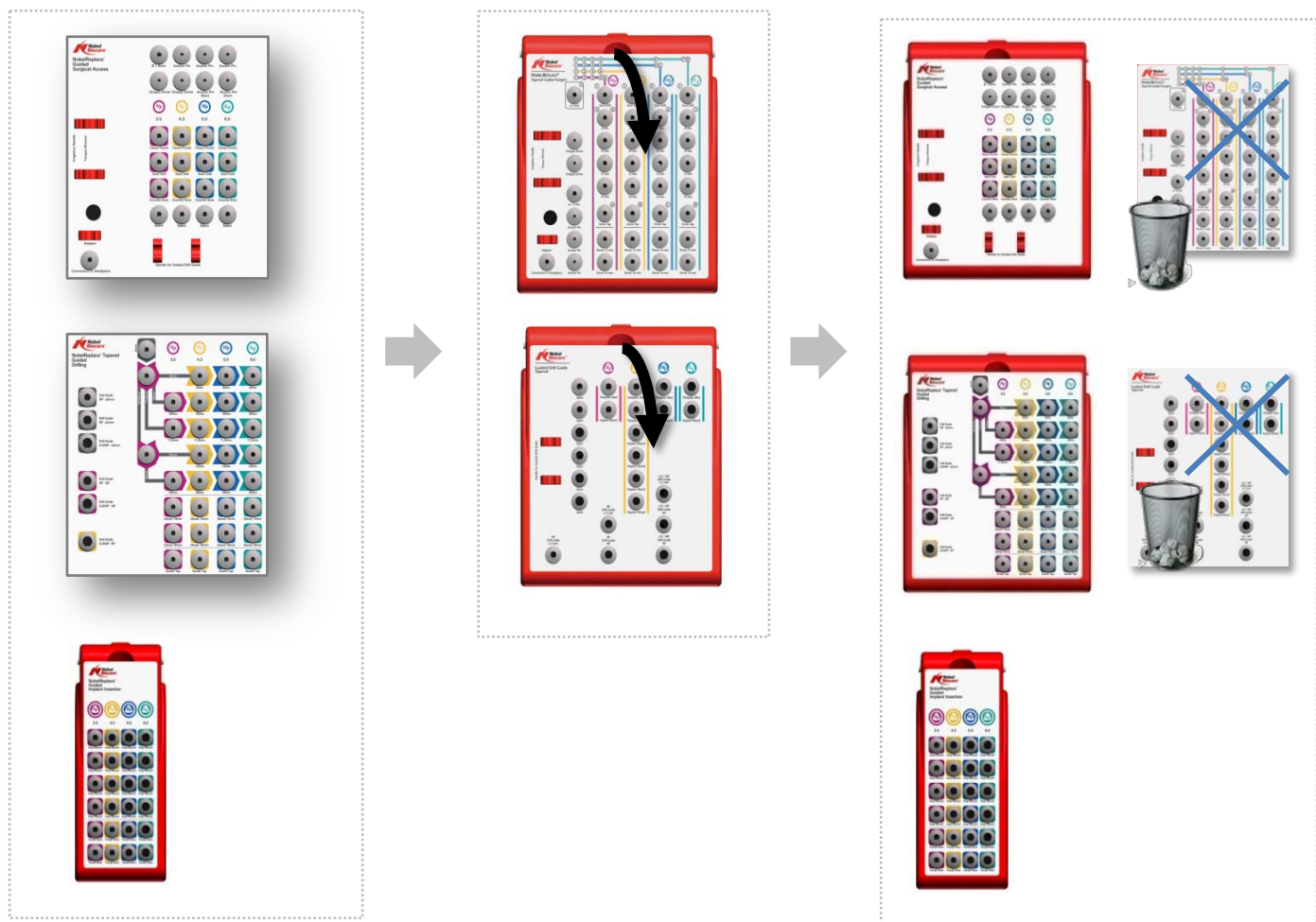

プレートの交換は容易に行うことができます。

下図をご参照の上、プレートを上に引き上げてボックスより取り外し、その後、新プレートを、ボックスにはめ込み装着してください。プレートをはめ込む際には、プレートのツメ部分が折れないようにご注意ください。

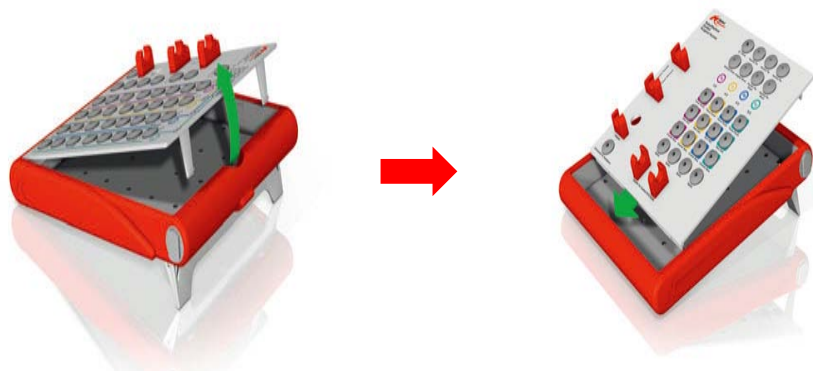

製品についてのお問い合わせは、営業またはカスタマーサービスへお問い合わせください。

お問い合わせ先: ノーベル・バイオケア・ジャパン株式会社 カスタマーサービス
〒108-0075 東京都港区港南2-16-4 品川グランドセントラルタワー8F TEL: 03-6717-6191 (代表)