

## Conforto Luce - コンフォルト ルーチェ -

コンフォルト は、インプラント治療に適した性能を各種備え、美しいフォルムとシンプルな操作で、機能性と操作性を兼ね備えたエンジンです。

### ユニット本体

- 見やすさを追求したパネル角度
- 5種類のプログラム設定
- 5段階の注水量調整機能付き
- トルクキャリブレーション機能付き

### ハンドピース

- 小型で軽量
- 重さ 64.8 g (ライト付き)
- ヘッドサイズ  
13.5mm(H) x  $\phi$ 9.6mm<sup>\*1</sup>



### モーター

- 静かでコンパクト
- 重さ 125 g
- 81.9mm(L) x  $\phi$ 23.5mm<sup>\*2</sup>

□ Conforto Luce コンフォルト ルーチェ (ライト付き)

□ Conforto コンフォルト (ライト無し)

\*上記はセット販売価格、税別です。

医療機器認証番号: 223ALBZX00021000




- ・LEDライト調節付き(強・弱・オフ)
- ・回転数に関わらず25,000 lux



- ・主要機能はすべて  
フットコントロールで操作可能

## プログラム設定

プログラムモード、回転速度、回転方向、トルク上限、注水量、モーター照明光量に対する設定値を5セットまで記憶し、記憶内容を呼び出して使用することができます。

プログラム番号	画面表示	モード	治療の種類	回転方向	回転速度 (min <sup>-1</sup> )		トルク (Ncm)	
					初期設定値	Max設定上限値	初期設定値	Max設定上限値
1		ドリリング	インプラント埋入部位の形成	正	800	2,000	25	25
2		埋入	インプラントの埋入/タップ	正	25	30	15	50
3		埋入	インプラントの埋入/タップ	正	25	30	35	50
4		補綴	アバットメントや補綴用スクリューの締め付け	正	15	20	5	35
5		等速 (1:1)	口腔外科	正	15,000	40,000	—	—

初期設定値は工場出荷時のプログラム設定です。

## 製品構成

ライト付き

ライト無し

### NBY1002112 コンフォルト ルーチェ

(セットには以下の製品が含まれます。単品でのご購入も可能です。)

- NBE1049003 コンフォルト ルーチェ モーター (ライト付き)
- NBC1003004 コンフォルト ルーチェ ハンドピース (ライト付き)
- NB20000396 パイプホルダー (X-SG20L)
- NBU389013A 電源コード
- NBZ272A00D FC-51フットペダル (2mコード仕様)
- NB10000324 内部注水ノズル
- NBU370152 ロッド (ボトル支柱)
- NB10001595 プロテクションプラグ
- NBY900083 チューブホルダー (7個入)
- NB20000512 ノズル清掃針
- NBZ019090 Eタイプスプレーノズル
- NBU195152 ヒューズ (T3.15A 250V) \*
- NBZ182100 パナスプレープラス
- NBU494304 キャリブレーションバー
- NBZ1029201 モータースタンド
- NBY1001210 イリゲーションチューブセット (10個入) \*
- NBC823752 二分岐注水チューブ (1個入)
- NBZ289101 抗菌カバー
- NB12457102 Oリング (黒色小/プロテクションプラグ用) \*
- NB12074080 Oリング (黒色/モーターインサート部用) \*
- NBY1001907 コンフォルト キャリングケース

### NBY1002111 コンフォルト

(セットには、下記3点および左記のライト付き4~20番の製品が含まれます。)

- NBE290008 コンフォルト モーター (ライト無し)
- NBC1010004 コンフォルト ハンドピース (ライト無し)
- NB20000357 パイプホルダー (SG20)

## 仕様

<コントロールユニット>

電源	AC100V 50/60Hz
消費電力	52VA
注水ポンプ最大吐出量	75mL/min
寸法	W301 x D242 x H108mm

<モーター>

型式	SG50LED	SG50MS
回転速度	200~40,000 min <sup>-1</sup>	
定格入力	DC30V	
寸法	φ24.4 x L114.7mm (モーターコードを除く)	φ23 x L109.6mm (モーターコードを除く)
照明	白色LED	—

<フットコントロール>

型式	FC-51
コード長	2.0m

お願い: 単品でのご購入の際には、別途納期をご確認ください。

\*印の付いた製品はセット販売時のみ、入り数が異なります。

セット販売時入り数

- NBU195152 ヒューズ(T3.15A 250V) 2個  
 NBY1001210 イリゲーションチューブセット 5個  
 NB12457102 Oリング (黒色小/プロテクションプラグ用) 2個  
 NB12074080 Oリング (黒色/モーターインサート部用) 2個