

Product Information

製品情報

2004年2号

今回の内容

- ・ リプレイスセレクト・インプラント・ドライバーの製品改良
- ・ リプレイスセレクト・インプラント・リトリーバルツール発売
- ・ リプレイスセレクト・チップ付ツイストドリル・テーパード製品改良
- ・ チタンスリーブの表記改良


Vol.4 Dec. 2004

リプレイスセレクト・インプラントドライバー製品改良

【改良点】

1. インプラントのローブの位置を明確にするために、ドライバーの中央部分を改良しました。
2. ドライバーとインプラントの接続の性能を高めるために、窒化チタンコーティングされました。
3. 接続の安定性を高めるために、先端のパイロット部を長くしました。これにより、先端部がガイドとなり、ドライバーを間違った方向に挿入するのを防ぎます。間違った方向に挿入したドライバーでトルクをかけることによりインプラント破折の原因になります。


2と3はNPの破折防止のための改良ですが、どちらにしても45～50Ncmを超えるトルクでの埋入は避けてください。

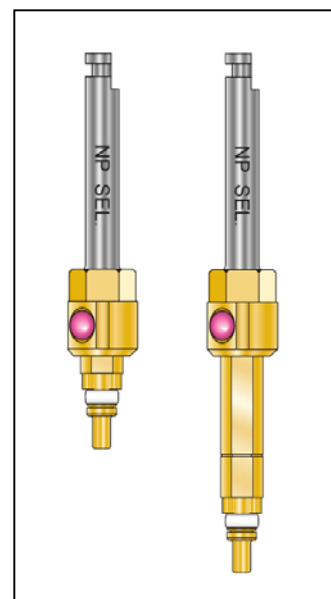

【新品番】

改良に伴い、製品番号と価格が変更になります。

29506 インプラントドライバー・ショート NP → 31604 インプラントドライバー・ショート NP ¥9,700
29507 インプラントドライバー・ロング NP → 31625 インプラントドライバー・ロング NP ¥9,700

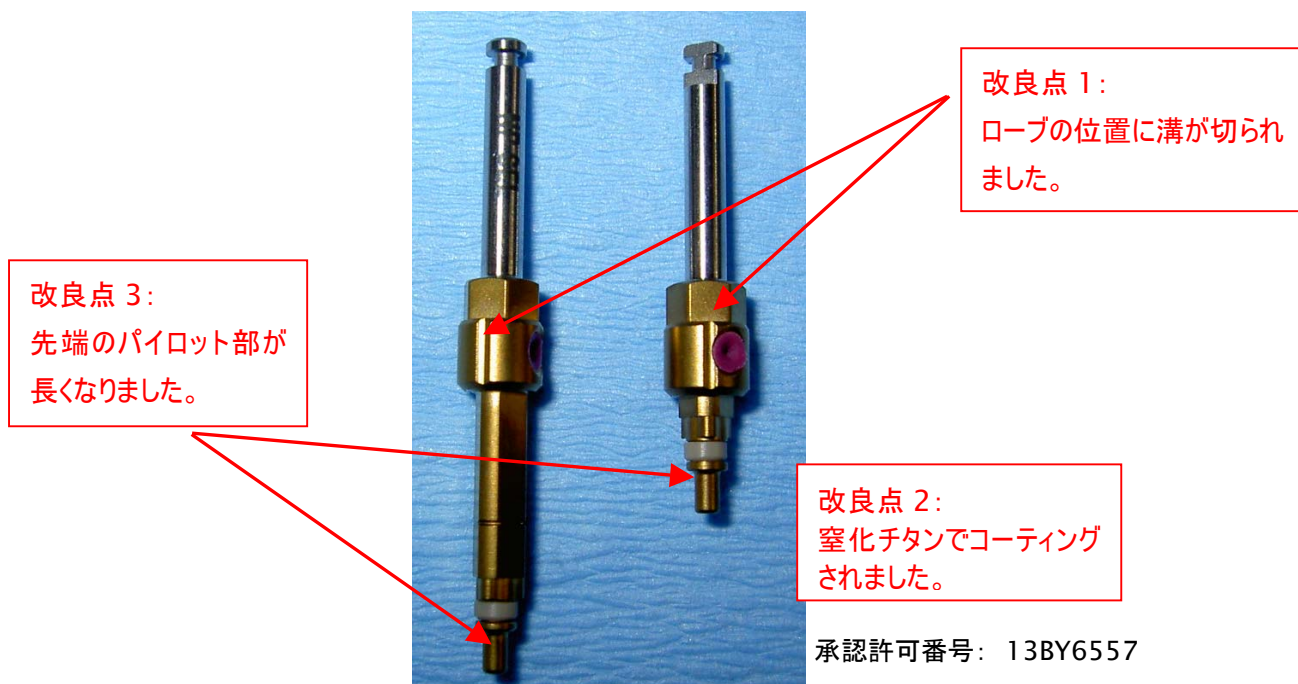

また、RP/WP/6.0用インプラントドライバー・ショートは、上記1の改良がされます。

製品番号および価格の変更はございません。

29508 インプラントドライバー・ショート RP
29510 インプラントドライバー・ショート WP
29997 インプラントドライバー・ショート 6mm

リプレイスセレクト・インプラント・リトリーバルツール NP 発売

リプレイスセレクト・インプラント・リトリーバルツール NP は埋入中に破損したインプラントや、骨結合していないと思われるインプラントを除去するために設計されています。強化ステンレス製で、左巻きのねじ山が切つてある直径がインプラントの内ねじに噛み込むような太さのテーパ形状で、骨からインプラントを除去できるようなデザインになっています。このインスツルメントはノーベルバイオケアの外科用トルクレンチ、またはラチェット&ラチェットアダプターに接続できる様な設計になっています。

インプラント除去の他の方法としては、トレフィンバーを使用しインプラントの外側の骨を切削する方法がありますが、この方法の場合、インプラントを引き抜く方法より少なくとも直径で1.5mm 骨を余計に欠損させてしまいます。リトリーバルツール NP を使用することにより、骨を必要以上に欠損させることがないので、同じサイズのインプラントを即時再埋入することができ、デンスポンドリルを使用したときのようなパッシブフィットが得られます。

リプレイスセレクト・インプラント・リトリーバルツールは滅菌済製品で、ねじ山がシャープで噛み込みを確実にするためにディスプレイ（1回使用）です。再使用するとねじ山が鈍くなりインプラントへの噛み込みが悪くなります。開封しても使用しなかった場合はオートクレーブ滅菌可能です。

31438 リプレイスセレクト・インプラント・リトリーバルツール NP 価格 ¥5,500

(2005年1月より販売開始いたします。)



承認許可番号： 13BY6557

リプレイスセレクト・チップ付ツイストドリル・テーパード 2mm 製品改良

【改良点】

1. ドリルのメモリを機械仕上げによるグループ(溝)で示していましたが、レーザー表示になり、より見やすくなりました。但し、メモリの位置や寸法に変更はありません。
2. 内部注水用ホールの位置がより先端に近い部分に変更になりました。

【新価格】

改良に伴い、価格が変更になります。製品番号に変更はございません。

29366 リプレイスセレクト・チップ付ツイストドリル・テーパード 2mm ¥1,600 → ¥1,700
(2005年1月1日より新価格となります。)



インプラント・チタンスリーブの表記改良

インプラントのパッケージ内のインプラントを収納しているチタンスリーブの表記が変わりました。

【改良点】

チタンスリーブに製品名とサイズが表記されました。

- * 今までは写真上の様に製品番号とロット番号が表示されていたので、手術時に外包から出したインプラントの種類、サイズがわかり難かったのですが、今後は写真下の様に製品名とサイズが表記されたので、より見やすく中身を判別しやすくなります。



- * 表記改良品の発送は製品在庫の状況によります。ご了承ください。